

# Stratamed®

Moderní filmotvorné krytí ran

## Viditelně lepší hojení<sup>3</sup>

Gelem **Stratamed®** dosáhnete viditelně lepšího výsledku hojení.

- ✓ Prevence vzniku abnormálních jizev.
- ✓ Optimální prostředí pro hojení ran.
- ✓ Snižuje zarudnutí a tmavé zabarvení.
- ✓ Vhodný pro dětskou i citlivou pokožku.
- ✓ Ideální k aplikaci na viditelná místa, jako obličej, krk a kůži v ohybu (kloubní plochy).
- ✓ Stratamed je možné použít u kojenců a v průběhu těhotenství a kojení.
- ✓ Po zaschnutí může být překryt opalovacími přípravky, make-upem, kosmetickými krémy i oděvy.
- ✓ **STERILNÍ do otevření.**



Zdravotnický prostředek CE 0086

## Jak velké balení gelu Stratamed® potřebuji?

Balení:	Velikost rány / jizvy
Stratamed® 5g	podélná 2–4 cm
Stratamed® 10g	podélná 5–8 cm
Stratamed® 20g	podélná 10–12 cm
Tuba vystačí na 2–3 měsíce léčby při aplikaci 2× denně.	

Literatura: 1. Upton Z et al. Wounds Int 2011; 2(1): 7–8. 2. Gaultitz GG et al. Mol Med 2011; 17(1–2): 113–125. 3. Sandhofer M, Schauer P. SKINmed 2012; 10: S1–S7.

**axonia**  
PHARMA

**Výhradní distributor pro ČR a SR:**  
AXONIA, a.s. Bydžovská 185,  
190 14 Praha 9 Česká republika.

**Stratpharma**  
Switzerland

**Výrobce:** Stratpharma AG,  
CH-4051 Basilej, Švýcarsko.

Razítko lékárný, kde můžete moderní filmotvorné krytí ran Stratamed zakoupit

Nebo objednejte ještě dnes na [www.eshop.axonia.cz](http://www.eshop.axonia.cz)

Viditelně  
lepší hojení

Odstraňuje  
stopy  
po operaci  
a úrazu

Moderní filmotvorné krytí ran  
**Stratamed®**



Moderní filmotvorné krytí ran

Stratamed®

## Rychlé a co možná nejlepší odstranění stop po operaci je důležité zvláště na viditelných částech těla

Ačkoliv nelze zabránit tomu, aby se kůže po operaci hojila jizvou, je možné docílit, aby byla jizva co nejméně patrná. V optimálním případě nakonec na kůži zůstane jen tenká bílá linka, která je kosmeticky přijatelná a na pohled nepatrná.

## Rychlé hojení je klíčem k minimalizaci rizika vzniku abnormální jizvy<sup>1</sup>

Epitelizace rány (překrytí novou pokožkou) opožděná o 10–14 dní dramaticky zvyšuje riziko vzniku hypertrofické jizvy.<sup>2</sup> **Stratamed®** je první silikonový gel, který lze aplikovat **na čerstvé rány po operaci či poranění, otevřené rány, popáleniny a místa, kde byla poškozena celistvost kůže.** Tím vytváří optimální prostředí pro rychlejší hojení rány, což vede k minimalizaci rizika abnormálního jizvení s nejlepším možným výsledkem léčby.

**Stratamed®** po nanesení na ránu a zaschnutí vytvoří flexibilní polopropustnou ochrannou vrstvu, která urychluje hojení tím, že:

- Zlepšuje hydrataci rány
- Urychluje hojení a epitelizaci rány (migraci keratinocytů)
- Snižuje zánětlivou reakci a dobu regenerace

Dochází tak k normalizaci tvorby kolagenu v ráně a tím k redukci rizika vzniku nevzhledné jizvy.

## Kdy použít Stratamed®

- Po chirurgickém, kosmetickém zákroku (včetně plastické chirurgie)
- Ihned po císařském řezu
- Po laserové terapii (včetně odstraňování tetování)
- Po chemickém peelingu, dermální abrazi a kryoterapii
- Úrazy, odřenin, popáleniny 1. a 2. stupně
- Rány po akné, vyrážkách a pokousání

## Jak používat Stratamed®

**Stratamed®** po nanesení zaschne a vytvoří průhlednou ochrannou vrstvu, která propouští vzduch a je voděodolná. Před aplikací je nutné ránu co nejdokonaleji zbavit nadměrného výpotku či tekutiny.

Aplikujte **velmi tenkou vrstvu gelu Stratamed®** na postižené místo a nechte zaschnout. Při správném použití **Stratamed®** zasychá během 5–6 minut, pokud je to déle použil/a jste příliš velké množství gelu. Aplikujte **Stratamed®** 1–2x denně, nebo dle doporučení Vašeho lékaře. Ránu je možné v případě potřeby přikrýt obvazem. V tom případě aplikujte **Stratamed®** pouze při převazu a zaschnutí není nutné. Pro dosažení nejlepších výsledků by měl být Stratamed v nepřetržitém kontaktu s pokožkou (24 hodin denně). **Doporučená doba léčby** je nejméně 60–90 dnů. Větší rány/jizvy se mohou hojit déle. Doporučujeme pokračovat v léčbě do doby, kdy již nejsou patrné žádné známky zlepšení.

**Stratamed®** je do otevření **STERILNÍ**.

*Stratamed® není vhodný na rány mokvající, produkující velké množství výpotku, tunelovitě rány a popáleniny 3. stupně.*

## Klinicky ověřený účinek gelu Stratamed®



Před léčbou



8. měsíc léčby

**Jizvy po operaci víček**  
Léčba: Stratamed v kombinaci s CO<sub>2</sub> frakčním laserem



Před léčbou



5. měsíc léčby

**Jizvy po operaci prsou**  
Léčba: Stratamed v kombinaci s CO<sub>2</sub> frakčním laserem



Po operaci



20. den léčby

**Plastická operace obličeje**  
Léčba: Stratamed (monoterapie)



Před zákrokem



Den 0



7. den léčby

**Laserové odstranění jizev po akné**  
Léčba: Stratamed v kombinaci s CO<sub>2</sub> frakčním laserem



Před zákrokem



Den 0



10. den léčby

**Laserové odstranění vrásek**  
Léčba: Stratamed v kombinaci s CO<sub>2</sub> frakčním laserem a Botoxem



Před zákrokem



Den 0



10. týden léčby

**Hypertrofická jizva po operaci hrudníku**  
Léčba: Stratamed v kombinaci s CO<sub>2</sub> frakčním laserem



Den 0



4. týden léčby

**Dermální abrase**  
Léčba: Stratamed (monoterapie)

Léčbu vedl a fotografie pořídil Dr. Matthias Sandhofer, člen představenstva Mezinárodní společnosti dermatologické chirurgie (ISDS), celosvětově jediné profesionální organizace dermatologické chirurgie ([www.isdsworld.com](http://www.isdsworld.com), [www.sandhofer.at](http://www.sandhofer.at)).