

# Stratamark®

## Stratamark gel se nanáší na příslušná místa ve velmi tenké vrstvě

- Vysoký účinek: Stratamark gel má unikátní složení, které vyžaduje podstatně méně produktu pro aplikaci, než vyžadují běžné hydratační krémy nebo kosmetické přípravky.
- Snadná aplikace na všechny oblasti kůže, včetně exponovaných a citlivých oblastí.
- Po zaschnutí se může překrýt spodním prádlem, opalovacími přípravky anebo kosmetikou.



## Stratamark je průhledný a bez zápachu Neobsahuje alkohol, parfemace ani parabeny

- Neproniká pod úroveň stratum corneum (povrchová vrstva pokožky).
- Je vhodný pro těhotné ženy, kojící maminky, děti i osoby s citlivou pokožkou.

Od Stratpharma AG (Švýcarsko) výrobce:

## Stratamed®

Gel k léčbě jizev pro lékařské použití

### Stratamed je průlomová léčba otevřených ran a poškozené kůže

- Stratamed lze použít ihned po císařském řezu, chirurgických zákrocích, resurfacingu apod.
- Stratamed napomáhá hojení ran a zajišťuje viditelné výsledky po poškození kůže.
- Stratamed mohou bezpečně používat děti i těhotné a kojící ženy.



## Strataderm®

Gel k léčbě jizev

### Strataderm – pro prevenci a léčbu hypertrofických a keloidních jizev

- Strataderm se používá na jizvy po císařském řezu, chirurgickém zákroku, úrazu apod.
- Strataderm mohou bezpečně používat děti i těhotné a kojící ženy.



# Stratamark®

## Pečujte o Vaše dítě – a Vaši pokožku



- Stratamark zjemňuje a vyhlazuje vystouplé a pokleslé strie.
- Snižuje zarudnutí a zabarvení strií.
- Hydratuje a chrání pokožku.
- Je vhodný pro těhotné ženy, kojící maminky, děti i osoby s citlivou pokožkou.
- Zmírňuje svědění a nepříjemné pocity ve striích.

[www.axonia.cz](http://www.axonia.cz)

Zdravotnický prostředek CE

**axonia**  
PHARMA

**Stratpharma**  
Switzerland

Výrobce: Stratpharma AG, CH-4051 Basilej, Švýcarsko.

Distributor pro ČR a SR: AXONIA, a.s., Obrovského 644/3, 141 00 Praha 4, Česká republika.

# Stratamark®

K prevenci a léčbě strií



**NOVINKA**

## Užijte si mateřství bez strií

# Stratamark®

Unikátní zdravotnický prostředek  
pro prevenci a léčbu strií

## Strie jsou více než pouhá kosmetická záležitost



Strie jsou známé a časté postižení kůže a mohou způsobovat **značné obavy a pocity nejistoty** během těhotenství a po něm.

Strie jsou často výsledkem **rychlého napínání kůže** při rychlém růstu nebo rychlé změně hmotnosti.

Strie mohou rovněž ovlivnit **hormonální změny** v pubertě a těhotenství,

při posilování či užívání hormonální substituční terapie, atd.<sup>1</sup>

Ačkoliv nepoškozují Vaše zdraví, mohou způsobovat fyzické příznaky jako je **svědění, citlivost a bolest**. Kvůli jejich vzhledu mohou též významně ovlivnit **Vaše sebevědomí a image**.<sup>2</sup>

### Na rozdíl od kosmetických a hydratačních přípravků je Stratamark zdravotnický prostředek s léčebným účinkem pro prevenci a léčbu strií

- Strie mohou způsobit fyzické příznaky, jako je svědění, citlivost a bolest
- Mohou významně ovlivnit Vaše sebevědomí a image<sup>2</sup>

1. Bernstein E. What Causes Stretch Marks, 2008./The Patient's Guide to Stretch Marks, 2009  
2. Osman H et al. BJOG 2008;115:1138–1142

## O striích

Strie jsou druh tenkých zploštělých jizev.

Ačkoliv důvod vzniku strií není plně objasněn, předpokládá se, že důvodem mohou být **abnormální změny podpurné tkáně kůže**.


V raných stádiích jsou strie mírně vyvýšené, růžově až červeně zbarvené, postupem času jejich barva nabývá světle fialový odstín, až nakonec zůstanou bílé a pokleslé s jemně vrásčitými linkami.

Strie vznikají důsledkem těhotenství, rychlého růstu v období dospívání, přírůstku tělesné hmotnosti nebo kulturistiky. **Pajizévký (Striae distensae)** je obecný termín pro strie, ale existuje několik různých klasifikací:

- **Striae gravidarum** označují strie, které vznikají v důsledku těhotenství.



- **Striae rubrae** označují časné červené jizvy.

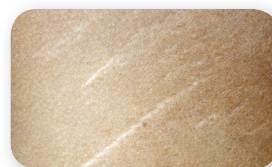

- **Striae albae** označují zralé, bělejší a pokleslé strie.

- Strie postihují až 90 % těhotných žen<sup>1</sup>
- Strie jsou dva a půlkrát častější u žen<sup>1</sup>

1. Osman H et al. BJOG 2008;115:1138–1142

## Prevence a léčba strií

Stratamark gel je svým složením unikátní gel speciálně vyvinutý pro prevenci a léčbu všech druhů strií.

Po zaschnutí vytváří **tenkou a pružnou ochrannou vrstvu**, která propouští vzduch a je voděodolná. Stratamark normalizuje cyklus tvorby kožního kolagenu, čímž strie vyhlazuje a účinně zabraňuje jejich tvorbě.

### Jak používat gel Stratamark

- Přesvědčte se, že kůže je čistá a suchá.
- Konečky prstů naneste na příslušná místa **velmi tenkou vrstvou** gelu Stratamark, rovnoměrně rozetřete ve velmi tenké vrstvě a nechte gel zaschnout.
- Gel aplikujte **jednou denně**, nebo po každém umytí.
- Pro dosažení nejlepších výsledků by měl být Stratamark v nepřetržitém kontaktu s kůží (24 hodin denně).
- Při správném použití by měl Stratamark **zaschnout během 3–4 minut**. Pokud gel zasychá déle, pravděpodobně jste nanесли příliš velké množství. Malé množství gelu vystačí na velkou plochu. Jemně odstraňte přebytečný gel ručnickem nebo papírovým ubrouskem a nechte dále zasychat.
- Jakmile Stratamark zaschne, můžete jej překrýt spodním prádlem, opalovacími přípravky nebo kosmetikou.

### Odstranění gelu Stratamark

Stratamark lze po aplikaci snadno odstranit z Vašich rukou: jednoduše umyjte ruce tekutým mýdlem a teplou vodou. Opakujte v případě potřeby.



## Kolik gelu Stratamark potřebuji?

Stratamark gel má unikátní složení, které vyžaduje podstatně méně produktu pro aplikaci, než vyžadují běžné hydratační krémy nebo kosmetické přípravky.

- Jedna 20g tuba obsahuje dostatek gelu pro přibližně měsíční léčbu žen v pozdních fázích těhotenství.
- Jedna 50g tuba obsahuje dostatek gelu pro přibližně dvouměsíční léčbu žen v pozdních fázích těhotenství.

## Doporučená délka léčby

### Prevence strií v průběhu těhotenství

Stratamark doporučujeme užívat od začátku druhého trimestru těhotenství (13. týden) nebo od vzniku prvních strií. Léčba by měla pokračovat po dobu minimálně 60–90 dnů po porodu.

### Prevence vzniku strií v období rychlého růstu

Stratamark by se měl používat po celé období rychlého růstu nebo do doby, kdy již není kůže pevně napnutá. Poté by měla léčba pokračovat po dobu dalších 60 až 90 dnů.

### Léčba již existujících strií

Stratamark by se měl používat po dobu nejméně 60 až 90 dnů (24 hodin 7 dnů v týdnu). Doporučujeme pokračovat v léčbě do doby, kdy již nejsou patrné žádné známky dalšího zlepšení. Závažné a/nebo starší strie mohou vyžadovat delší léčbu.

Stratamark se může používat i v kombinaci s jinými přípravky pro léčbu strií, včetně laserové terapie, s doporučením Vašeho ošetřujícího lékaře.

### Stratamark je navržen speciálně pro prevenci a léčbu strií

- Zjemňuje a vyhlazuje strie.
- Snižuje zarudnutí a zbarvení strií.
- Zmírňuje svědění a nepříjemné pocity ve striích.

### Stratamark vytváří po zaschnutí ochrannou silikonovou vrstvu, která propouští vzduch a je voděodolná

- Umožňuje kůži normalizovat cyklus tvorby kolagenu.
- Hydratuje a chrání strie.